

# 取扱説明書

日 本 製

このたびは、(有)ワールドハシタテの杖をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために、  
必要な注意事項や使い方が説明してあります。  
ご使用になる前に必ずお読みください。この説明書は大切に保管してください。


## この杖の特徴 (意匠登録1537802, 1548565)

○杖は歩行を補助するものであります。本製品のグリップは天然木の木目をいかした手作りになっており  
ます。円形のグリップならではの使い方を活かして、快適な歩行にお役立てください。

### ●円形グリップの使い勝手、便利さ


- ・円形のグリップにすることにより、平坦な道路では  
円の上部を握って歩行ができます。(図1)
- ・内側に波状、外側に面と角の加工を施し、握った  
時に手になじみ易く、すべりにくくなっています。

(図1) 歩行時

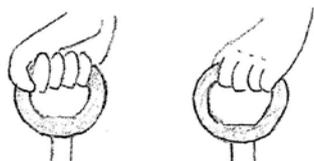


- ・坂や階段を上る時は、グリップの側部を握ることで  
手がらくに感じられ疲労や不安定感が軽減でき  
ます。(図2)

(図2) 上る時

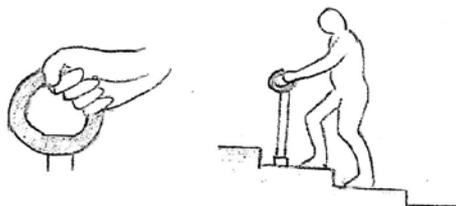


- ・椅子などから立ち上がる際は、両手でグリップの  
両方を握りながら、らくに立つことができます。(図3)

(図3) 立ち上がる時

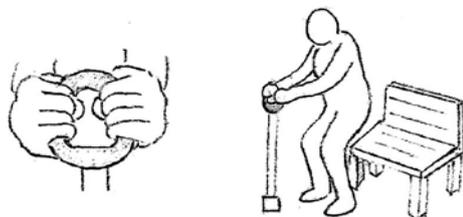

- ・掛けられます

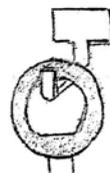

- ・この他にも利便性があります。

歩行時以外は手を入れて使えますが、  
事故や怪我の原因になることがあります  
ので、お気をつけ下さい。

- ・両手が使えます



**\* 歩行時は手を入れないで下さい。**



- ・全てのご使用方法において、十分に安全面を考慮してお使いください。

この様な行為はしないでください


こじ開ける

投げる

物をのせる  
物を運ぶ

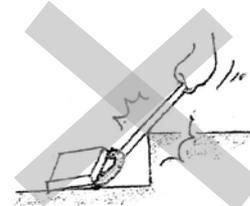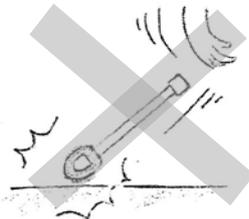

## ●各部名称

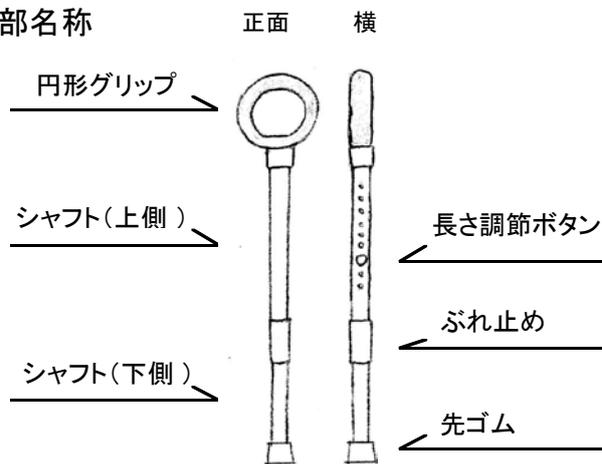


材 質	本 体	アルミニウム合金	
	円形グリップ	木製(越後杉)	
サ イ ズ	全 長	700mm~900mm	
	円形グリップ	大	外径120mm 内径80mm
		小	外径115mm 内径78mm
	厚さ	23mm(大小共通)	
	伸縮幅	200mm	
	先ゴム内径	16mm	
重量	340g		

※各サイズ、重量につきましては、1つ1つ手作りしている為、若干の誤差があります。

## ●長さの調節方法


1. ボタンを押しシャフト(下側)をスライドさせます。
2. 自分の身長に合った長さの調節穴にボタンを掛けてください。
3. ボタンは確実に調節穴から出ていることを確認してください。

ボタンを押しながらシャフトをスライドさせる

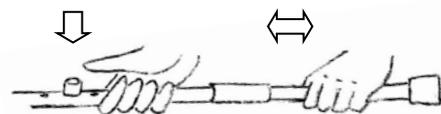

## ●杖長さの目安

- 杖先を足先の前方外側20cmの場所に置いたとき、肘が30~40度曲がる状態が、長さを決める目安です。
- ・一般的には身長÷2+3cm位が長さの目安です。
  - ・この杖は固定穴の間隔25mmで9段階調節になっております。

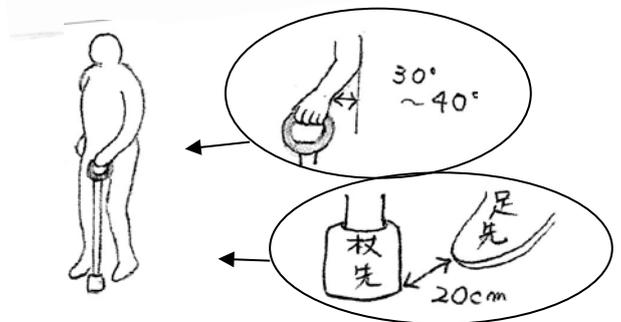

## ⚠ 使用上の注意

杖以外の目的では使用しないで下さい。

本製品は杖なしで歩ける方の歩行を補助するものであり、全体重を支えるものではありません。

1. ご使用前に各部の異状がないかを点検し、ご使用中も異状が認められた時は使用しないで下さい。
2. 長さが体に合わない時は、事故の原因となり、危険ですので使用をしないで下さい。
3. 先ゴムは必ず装着し、先ゴムが摩耗したり、破れた時は早めに新しい先ゴムと交換してください。  
(市販品の内径16mmが使えます)
4. ご使用目的以外には絶対に使用しないでください。
5. 人や物をついたり、叩いたりしないでください。
6. 長くご使用いただく為に、使用後は汚れ水分などは拭き取り高温低温多湿の場所はさけて保管して下さい。
7. 柔らかい地面や、雪道や滑りやすい場所、凹凸のある場所では使用しないで下さい。  
やむをえず使用する場合は、充分注意して同伴者などの介助を得て下さい。
8. 落雷の危険がある時は使用しないでください。
9. 分解は行わないでください。
10. シャフト(上側)からシャフト(下側)を引き抜かないで下さい。
11. お子様の遊び道具にならないようご注意ください。
12. 歩行時はグリップを持ってご使用ください。グリップの中に腕を通したまま使用しますと事故や怪我の原因にもなり危険ですので絶対にしないでください。

○ご不明な点、修理のご相談は下記お問い合わせ先にご連絡ください。

○製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

○廃棄の際はお客様の市町村の指示に従ってください。

## お問合せ先

有限会社 ワールドハシタテ

〒943-0506 新潟県上越市清里区菅原98-1

TEL:025-529-1180

Eメール:w-tsue@w-hashitate.com

FAX:025-529-1187

ホームページ:https://w-hashitate.com/